

# comco

BRUKSANVISNING

# Förlängningsdel



## Säkerhetsföreskrifter

- Läs föreskriften noggrant och spara den för framtida bruk.
- Stick inte in vassa föremål i förlängningsdelen.
- Använd endast förlängningsdelen för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual.
- Undvik skador genom att hålla förlängningsdelen borta från varma källor eller eld.
- Placera förlängningsdelen noggrant och kontrollera att rätt storlek används.

## CE-Märkning

Denna produkt är CE-märkt enligt MDR (Medical Device Regulation) (EU) 2017/745 och är en medicinteknisk produkt. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

## Användning

Förlängningsdel används för att förlänga madrassen så att den passar sängen. Om madrassen har handtag på kortsidan kan förlängningsdelen fästas i dessa med kardborrebanden. Finns ej något att fästa i så placeras förlängningsdelen mellan madrass och sänggavel.

## Fakta Förlängningsdel

Kärna: Kallskum

Hygienöverdrag 200g/m<sup>2</sup>

Färg: Blå

Tvättrådsetikett med leverantörsnamn, artikel, tvättinstruktioner, artikelnummer samt storlek finns på insidan av hygienöverdraget.

## Storlek m/artikelnummer

85x10x12cm – SV-1CCZN08512  
90x10x12cm – SV-1CCZN09012  
105x10x12cm – SV-1CCZN10512

85x10x14cm – SV-1CCZN00145  
90x10x14cm – 1CCZN00160  
105x10x14cm – SV-1CCZN00146  
120x10x14cm – SV-1CCZN00179

85x20x14cm – SV-1CCZN00143  
90x20x14cm – SV-1CCZN00133  
105x20x14cm – SV-1CCZN00144  
120x20x14cm – SV-1CCZN00183

## Rengöring och rekonditionering

Överdraget ska rengöras och rekonditioneras för att undvika eventuell smittspridning.

Etikett med tvättanvisningar är placerad på insidan av hygienfodralet. Hygienöverdrag tvättas i max 90 °C. Överdraget kan även torktumlas.

Använd en fuktig trasa med ett skonsamt rengöringsmedel för att rengöra ytan. Torka sedan av den fuktiga ytan med en torr trasa. Vid behov använd även desinfektionsmedel såsom DAX, Virkon, Perform eller andra vanligt förekomna upphandlade medel. Hygienöverdraget tål rengöring med alkoholbaserad ytdesinfektion innehållande tensider.

Efter rengöring kontrollera hygienöverdraget.

Är hygienöverdraget skadat ska det bytas ut. Vid skadat hygienöverdrag kontrollera även att ingen vätska trängt ner till skumkärnan.

## Destruering

Emballage sorteras under brännbart avfall.

## Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelserna är rapporterade till oss. Returnering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

## Tillverkare



**Kontakt:**

Telefon: 040 45 47 87

Fax: 040 45 47 99

E-post: [info@comco.se](mailto:info@comco.se)

**Postadress:**

COMCO AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

**Godsadress:**

COMCO AB

Radiatorvägen

Port 5-8

283 43 Osby

**Support:**

Helgfria vardagar 8.00-17.00