

comco

BRUKSANVISNING

Solatium Basmadrass Medium



Innehåll

Säkerhetsföreskrifter.....	3
CE-Märkning	3
Introduktion	3
Uppackning.....	3
Användning.....	3
Fakta Solatium Basmadrass Medium	4
Storlekar	4
Rengöring och rekonditionering.....	4
Garanti.....	4
Destruering.....	4
Retur och reklamationer	5
Tillverkare.....	5

Säkerhetsföreskrifter

- Läs föreskriften noggrant och spara den för framtida bruk.
- Stick inte in vassa föremål i madrassen.
- Använd endast madrassen för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual.
- Undvik skador genom att hålla madrassen borta från varma källor eller eld.
- Placera madrassen noggrant och kontrollera att rätt storlek används.
- Madrassen ska användas så att den inte blir skadad eller klämd

CE-Märkning

Solatium Basmadrass Medium är CE-märkt enligt MDR (Medical Device Regulation) (EU) 2017/745 medicintekniska produktdirektivet klass 1. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

Introduktion

Solatium Basmadrass Medium placeras vid användning direkt på sängbotten. Madrassen är lämplig att använda i vård- och omsorgsmiljö samt i hemmiljö.

Uppackning

Våra madrasser levereras rullpackade/komprimerade i återvinningsbar plast. Innan påbörjande av uppackning kontrollera att madrassen ej är skadad. Avlägsna sedan plasten försiktigt. Användning av vassa föremål vid öppnandet bör undvikas då man riskerar att skada madrassen. Efter avlägsnandet av plasten bör madrassen placeras i plant läge för att återhämta sin normala ursprungliga form. Madrassen går även att använda direkt efter uppackning.

Användning

Solatium Basmadrass Medium placeras vid användning direkt på sängbotten. Används av brukare med varierande grad av funktionsnedsättning. Madrassen ger god komfort och avlastning. Hygienöverdraget har dragkedja med droppskydd på tre sidor och har ett avtagbart madrassfodral som är slitstarkt och avtorkningsbart. Överdraget är även försett med bärhandtag.

Fakta Solatium Basmadrass Medium

Fyllning 12cm Kallskum 35kg/m³ (HR3532)

Hygienöverdrag 200g/m²

Förpackning: Rullpackad i klar plast

Färg hygienöverdrag: Blå

Rekommenderad brukarvikt 0-130kg

Etikett med anvisningar om tvätt, brukarvikt, artikelnummer, artikelnamn, storlek, och tillverkningsdatum är placerad på insidan av hygienfodralet.

Beräknad livslängd för Solatium Basmadrass Medium är 5 år

Storlekar

Solatium Basmadrass Medium finns i följande storlekar:

80x200cm, artikelnummer S3512-080200

85x200cm, artikelnummer S3512-085200

90x200cm, artikelnummer S3512-090200

90x210cm, artikelnummer S3512-090210

105x200cm, artikelnummer S3512-105200

120x200cm, artikelnummer S3512-120200

Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål

Rengöring och rekonditionering

Överdraget ska rengöras och rekonditioneras för att undvika eventuell smittspridning.

Etikett med tvättanvisningar är placerad på insidan av hygienfodralet.

Hygienöverdrag tvättas i max 95 °C. Överdraget kan även torktumlas.

Använd en fuktig trasa med ett skonsamt rengöringsmedel för att rengöra ytan.

Torka sedan av den fuktiga ytan med en torr trasa. Vid behov använd även desinfektionsmedel såsom DAX, Virkon, Perform eller andra vanligt förekomna upphandlade medel. Madrassens hygienöverdrag tål rengöring med alkoholbaserad ytdesinfektion innehållande tensider.

Efter rengöring kontrollera hygienöverdraget.

Är hygienöverdraget skadat ska det bytas ut. Vid skadat hygienöverdrag kontrollera även att ingen vätska trängt ner till madrasskärnan.

Garanti

3 år


Destruering

Solatium Basmadrass Medium samt emballage sorteras under brännbart avfall.

Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelserna är rapporterade till oss. Returnering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

Tillverkare

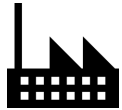

COMCO AB

Kontakt:

Telefon: 040 45 47 87

Fax: 040 45 47 99

E-post: info@comco.se

Postadress:

COMCO AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Godsadress:

COMCO AB

Radiatorvägen

Gate 8

283 43 Osby

Support:

Helgfria vardagar 08.00-17.00