

comco

BRUKSANVISNING

Solatium Heavy



Säkerhetsföreskrifter

- Läs föreskriften noggrant och spara den för framtida bruk.
- Stick inte in vassa föremål i madrassen.
- Använd endast madrassen för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual.
- Undvik skador genom att hålla madrassen borta från varma källor eller eld.
- Placera madrassen noggrant och kontrollera att rätt storlek används.
- Madrassen ska användas så att den inte blir skadad eller klämd

CE-Märkning

Solatium Heavy är CE-märkt enligt MDR (Medical Device Regulation) (EU) 2017/745 medicintekniska produktdirektivet klass 1. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

Introduktion

Solatium Heavy används i vårdmiljöer och är anpassad för tyngre brukare. Madrassen placeras direkt på sängbotten.

Uppackning

Våra madrasser levereras rullpackade/komprimerade i återvinningsbar plast. Innan påbörjande av uppackning kontrollera att madrassen ej är skadad. Avlägsna sedan plasten försiktigt. Användning av vassa föremål vid öppnandet bör undvikas då man riskerar att skada madrassen. Efter avlägsnandet av plasten bör madrassen placeras i plant läge för att återhämta sin normala ursprungliga form. Madrassen går även att använda direkt efter uppackning.

Användning

Solatium Heavy placeras vid användning direkt på sängbotten. Madrassen används i vårdmiljöer och är anpassad för tyngre brukare. Hygienöverdrag har dragkedja med droppskydd på tre sidor med ett avtagbart madrassfodral som är slitstarkt och avtorkningsbart. Överdraget är även försett med bärhandtag.

Fakta Solatium Heavy

Fyllning 15cm skum 55kg/m³

Hygienöverdrag 200g/m²

Färg hygienöverdrag: Blå

Rekommenderad brukarvikt 0-250kg

Etikett med anvisningar om tvätt, brukarvikt, artikelnummer, artikelnamn, storlek, och tillverkningsdatum är placerad på insidan av hygienfodralet.

Storlekar

Solatium Heavy finns i följande storlekar:

90x200cm, artikelnummer HESO-09020015

90x210cm, artikelnummer HESO-09021015

105x200cm, artikelnummer HESO-10520015

105x210cm, artikelnummer HESO-10521015

120x200cm, artikelnummer HESO-12020015

Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål

Rengöring och rekonditionering

Överdraget ska rengöras och rekonditioneras för att undvika eventuell smittspridning.

Etikett med tvättanvisningar är placerad på insidan av hygienfodralet. Hygienöverdrag tvättas i max 95 °C. Överdraget kan även torktumlas.

Använd en fuktig trasa med ett skonsamt rengöringsmedel för att rengöra ytan. Torka sedan av den fuktiga ytan med en torr trasa. Vid behov använd även desinfektionsmedel.

Garanti

2 år

Destruering


Solatium Heavy samt emballage sorteras under brännbart avfall.

Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelsen är rapporterad till oss. Returnering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även

anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

Tillverkare

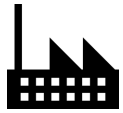

COMCO AB

Kontakt:

Telefon: 040 45 47 87

Fax: 040 45 47 99

E-post: info@comco.se

Postadress:

COMCO AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Godsadress:

COMCO AB

Radiatorvägen

Gate 8

283 43 Osby

Support:

Helgfria vardagar 08.00-17.00