

BRUKSANVISNING

Kilkudde m/hygienöverdrag



Säkerhetsföreskrifter

- Läs föreskriften noggrant och spara den för framtida bruk.
- Stick inte in vassa föremål i kilkudden.
- Undvik skador genom att hålla kilkudden borta från varma källor eller eld.
- Placera kilkudden noggrant vid användning
- Kilkudden ska användas så att den inte blir skadad

CE-Märkning

Kilkudden är CE-märkt enligt MDR (Medical Device Regulation) (EU) 2017/745 medicintekniska produktdirektivet klass 1. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

Introduktion

Kilkudden används i vård- och omsorgsmiljö samt i hemmiljö och är avsedd att användas som hjälpmedel vid positionering.

Användning

Kilkudden används för att positionera och avlasta brukare. Kilkudden kan användas vid både liggande och sittande läge. Vid användning av en ersättningsmadrass upp till 14cm placeras stödkilarna under madrassen. Används en toppmadrass placeras stödkilarna mellan toppmadrassen och underliggande madrass.

Fakta Kilkudde

Kärna: Kallskum
Hygienöverdrag 200g/m²
Färg: Blå
Storlek: 70x26x15/5cm

Tillbehör

Kilkudde Hygienöverdrag i storlek 70x26x15/5cm
Artikel: TM-7026155

Rengöring och rekonditionering

Överdraget ska rengöras och rekonditioneras för att undvika eventuell smittspridning.

Etikett med tvättanvisningar är placerad på insidan av hygienfodralet. Hygienöverdrag tvättas i max 95 °C. Överdraget kan även torktumlas.

Använd en fuktig trasa med ett skonsamt rengöringsmedel för att rengöra ytan. Torka sedan av den fuktiga ytan med en torr trasa. Vid behov använd även desinfektionsmedel.

Destruering

Kilkudden samt emballage sorteras under brännbart avfall.

Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelserna är rapporterade till oss. Returnering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

Garanti

2år

Tillverkare

**Kontakt:**

Telefon: 040 45 47 87

Fax: 040 45 47 99

E-post: info@comco.se

Postadress:

COMCO AB

Brädgårdsvägen 28

23632 HÖLLVIKEN

Godsadress:

Radiatorvägen

Port 5-8

28343 OSBY

Support: Helgfria vardagar 8.00-17.00