


BRUKSANVISNING

Förlängningsdel

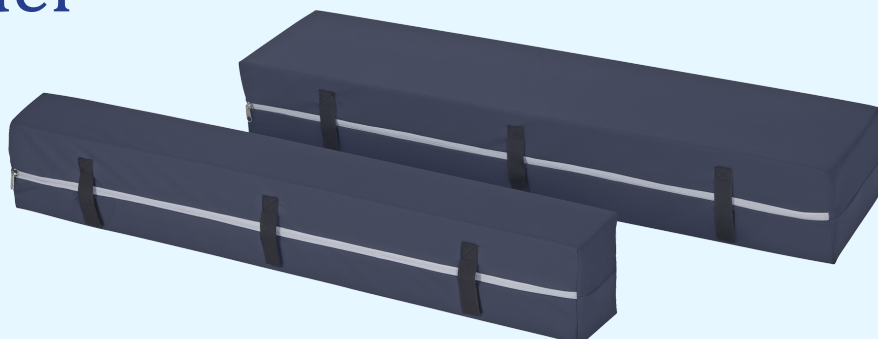

Säkerhetsföreskrifter

- Läs föreskriften noggrant och spara den för framtida bruk.
- Stick inte in vassa föremål i förlängningsdelen.
- Använd endast förlängningsdelen för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual.
- Undvik skador genom att hålla förlängningsdelen borta från varma källor eller eld.
- Placera förlängningsdelen noggrant och kontrollera att rätt storlek används.

CE-Märkning

Förlängningsdelen är CE-märkt enligt MDR (Medical Device Regulation) (EU) 2017/745 medicintekniska produkt-direktivet klass 1. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

Introduktion & Användning

COMCOs förlängningsdel används för att förlänga en madrass så att den passar sängen. Produkten är utrustad med kardeborreband för att enkelt kunna fästas i madrasser som har handtag på kortsidan. Saknar madrassen

handtag eller något annat att fästa i placeras förlängningsdelen mellan madrass och sänggavel (placeras med fördel i huvudändan).

Produkten finns i två tjocklekar; 14 cm, anpassad för madrassen **Stratum Sense** och 12 cm, anpassad för **Solatium Basmadrass**.

Fakta Förlängningsdel

Fyllning/Kärna: Kallskum

Överdrag: Hygienöverdrag 200 g/m²

Höjd: 12 cm / 14 cm

Färg: Mörkblå

Brandtest: Uppfyller kraven i EN 597-1, -2

Tvättrådsetikett med leverantörsnamn, tvättinstruktioner, artikelnummer och storlek sitter på insidan av överdraget.

Storlekar

För Solatium Basmadrass:

85x10x12 cm, artikelnr SV-1CCZN08512

90x10x12 cm, artikelnr SV-1CCZN09012

105x10x12 cm, artikelnr SV-1CCZN10512

För Stratum Sense:

85x10x14 cm, artikelnr SV-1CCZN00145

90x10x14 cm, artikelnr 1CCZN00160

105x10x14 cm, artikelnr SV-1CCZN00146

120x10x14 cm, artikelnr SV-1CCZN00179

85x20x14 cm, artikelnr SV-1CCZN00143

90x20x14 cm, artikelnr 1CCZN00133

105x20x14 cm, artikelnr SV-1CCZN00144

120x20x14 cm, artikelnr SV-1CCZN00183

Rengöring och rekonditionering

Förlängningsdelens överdrag ska rengöras och rekonditioneras för att undvika eventuell smittspridning. Etikett med tvätthanvisningar är placerad på insidan av fodralet. Överdraget tvättas i max 90°C och kan även torktumlas.

Använd en fuktig trasa med ett skonsamt rengöringsmedel för att rengöra ytan. Torka sedan av den fuktiga ytan med en torr trasa. Vid behov använd även desinfektionsmedel såsom DAX, Virkon, Perform eller andra vanligt förekommande upphandlade medel. Överdraget tål rengöring med alkoholbaserad ytdesinfektion innehållande tensider. Vid rengöring med klorin kan en koncentration på 1 000 ppm/0,1% användas.

Efter rengöring kontrollera överdraget. Är det skadat ska det bytas ut. Kontrollera i detta fall även att ingen vätska trängt ner till skumkärnan.

Destruering

Såväl förlängningsdelen som emballaget sorteras som brännbart avfall.

Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelserna är rapporterade till oss. Returnering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

Tillverkare

Kontakt

Telefon: 040 45 47 87

Email: info@comco.se

Hemsida: www.comco.se

Support

Helgfria vardagar 8.00-17.00

Postadress

COMCO AB
Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken

Fraktadress

COMCO AB
Radiatorvägen, Port 5-8
283 43 Osby

